

## VADEMECUM UTILIZZO VELOPLUS

- 1) VERIFICARE SEMPRE IL BLOCCO/SBLOCCO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO



- 2) TOGLIERE LA CHIAVE DI SICUREZZA (COPPIGLIA) ED AZIONARE LA LEVA VERSO L'ALTO PER FARE SCENDERE LA PEDANA



- 3) DOPO AVERE CARICATO LA CARROZZINA RIPOSIZIONARE LA CHIAVE DI SICUREZZA (COPPIGLIA) NELLA LEVA E FISSARE CON I 3 GANCI (1 ANTERIORE E 2 POSTERIORI) LA CARROZZINA



- 4) FISSARE LE CINTURE DI SICUREZZA SUL VENTRE DEL PASSEGGERO POSIZIONATE SOPRA I PASSARUOTE ANTERIORI



- 5) DOPO AVERE REGOLATO LA SELLA E SBLOCCATO IL FRENO DI STAZIONAMENTO COME RIPORTATO NEL PUNTO 1, ACCENDERE IL COMPUTER DELLA PEDALATA ASSISTITA SUL PRIMO LIVELLO, PREMERE SULLA FIGURA DELLA BICICLETTA PER DARE L'IMPULSO ALLA PARTENZA ED INIZIARE A PEDALARE



PESO MASSIMO PASSEGGERO **COMPRESA** LA CARROZZINA 120KG  
PESO MASSIMO CONDUTTORE 120KG

**DURANTE LE CURVE PROCEDERE CON PRUDENZA E SEMPRE IN SICUREZZA, AVENDO PREMURA DI CONTROLLARE IL TRAGITTO DELLE RUOTE ANTERIORI AFFINCHÉ NON SI TROVINO AD AFFRONTARE OSTACOLI (SOPRATTUTTO IN CASO SI PROCEDA SU MARCIAPIEDI O STRADE NON PROTETTE FARE ATTENZIONE CHE LE RUOTE NON CEDANO DAL LATO DELLO SBALZO).**

LA DURATA DELLA BATTERIA E' CONTRASSEGNA DA 5 PUNTI LUMINOSI DI COLORE VERDE, SE SONO ACCESI TUTTI E 5 E' AL MASSIMO DELLA CARICA, SE NE RIMANE ACCESO SOLO UNO BISOGNA PROVVEDERE ALLA RICARICA.